

MAZIC Claro

Disilicato de litio · CAD/CAM

125 €/caja (5)

Precio cliente

~420 MPa

Resistencia flexión

Cristalizado en horno

Acabado

QUÉ ES

Bloque vitrocerámico de **disilicato de litio** para CAD/CAM (Vericom). Estructura cristalina de alta densidad que da una resistencia y una estética superiores a otras cerámicas vítreas. Pensado para restauraciones donde manda el color y la translucidez.

125 €/caja

Precio

25 €

Por bloque

5 bloques

Uds/caja

1 día

Tratamiento

FICHA TÉCNICA

Propiedad	Dato
Material	Vitrocerámica de disilicato de litio
Resistencia a la flexión	~420 MPa
Translucidez	HT · LT · MO · HO (Opal)
Tonos	A1–D4, BL1–BL4, MO0–MO4, Opal1–2
Tamaños de bloque	C14 y B32
Acabado	Cristalización en horno (820–850 °C)
Indicaciones	Inlay · Onlay · Corona · Carilla

FLUJO DE TRABAJO

1. **Escaneo** intraoral del preparado.
2. **Diseño** CAD de la restauración.
3. **Fresado** — material blando: menos desgaste de fresas y motor.
4. **Cristalización** en horno (Programat P300/P310, 820–850 °C, ~17 min).
5. **Restauración** cementada el mismo día.

CEMENTACIÓN ADHESIVA

1. Prueba intraoral y ajuste.
2. Grabado con ácido fluorhídrico.
3. Aplicación de silano.
4. Cementado con U-Cem Premium y fotocurado.

OFERTA DE LANZAMIENTO

"4 + 1 caja de REGALO · 10 + 3 cajas SIN CARGO — 21% IVA no incluido. Stock limitado."

La corona la haces tú, el mismo día.

Con tu fresadora y un escáner abierto, cada bloque Claro es una restauración de máxima estética producida en clínica: sin laboratorio externo y con tu margen completo. Pídelo en aldrascan.com o al +34 676 21 65 38.