

MAZIC Duro

Cerámica híbrida nano · CAD/CAM

145 €/caja (5)

Precio cliente

200 MPa · 13 GPa

Resistencia

Sin horno · pulido

Acabado

QUÉ ES

Cerámica híbrida **nano** de 4ª generación (Vericom, 2017): **80% relleno cerámico inorgánico + 20% matriz de resina de alta densidad**. Combina la resistencia de la cerámica con la amortiguación de la resina. Se termina sin horno, con pulido mecánico.

145 €/caja

Precio

29 €

Por bloque

5 bloques

Uds/caja

13 GPa

Módulo

FICHA TÉCNICA

Propiedad	Dato
Material	Cerámica híbrida nano (resina + cerámica)
Resistencia a la flexión	200 MPa
Módulo elástico	13 GPa — amortigua como la dentina
Resistencia a la fractura	2,0
Translucidez	HT · LT
Tonos	HT: A1, A2, A3, B1 · LT: A1, A2, A3, A3.5, A4
Formatos	Bloque 12 y 14L (conexión CEREC) + discos ø98 (8–14T)
Acabado	Pulido mecánico — sin horno ni glaseado
Radiopacidad	Sí (chequeo de márgenes en Rx)
Indicaciones	Corona · Onlay · Inlay · Carilla

VENTAJAS CLÍNICAS

- **Sin horno ni glaseado:** pulido directo en clínica, más rápido por sillón.
- **Amortigua** la masticación (13 GPa) y **no desgasta** el diente antagonista.
- Fresado en seco o húmedo, menor tiempo y alta definición en zonas finas.
- Radiopaco: control de márgenes en radiografía.
- Mínima adhesión de placa y máxima estabilidad de color.
- Fácil reparación intra y extraoral.

CEMENTACIÓN ADHESIVA

1. Prueba intraoral y ajuste.

2. Chorreado de arena (óxido de aluminio 25–3 µm, 0,2 MPa).
3. Grabado con ácido fluorhídrico al 5%, 20 s.
4. Silano 60 s + cemento de resina (autoadhesivo o adhesivo).

OFERTA DE LANZAMIENTO

"20% de descuento desde la 3ª caja — 21% IVA no incluido. Stock limitado."

Posteriores e implanto-soportadas, sin horno y sin laboratorio.

La híbrida amortigua, protege el antagonista y se termina con pulido: produces la corona en clínica en menos pasos. Pídelo en aldrascan.com o al +34 676 21 65 38.